

Gebrauchsanweisung

Comfort Shield® SD

(Hylan A fluid, 0.15 %)



Beschreibung


Comfort Shield ist ein steriler, konservierungsmittelfreier, viskoelastischer, klarer Schutzschild für die Hornhaut. Es besteht ausschließlich aus Substanzen, die natürlicherweise im Auge vorhanden sind. Daher verursacht **Comfort Shield** keine Allergien und kann auch von Allergikern angewendet werden. **Comfort Shield** imitiert die Funktion natürlicher Tränen, schützt und befeuchtet die Augenoberfläche und macht sie gleitfähig. Dadurch bewirkt es lang anhaltende Erleichterung bei trockenen Augen bedingt durch:

- Keratoconjunctivitis sicca (Sjögren Syndrom)
- Hornhautverletzungen, Erosionen, operative Eingriffe an der Hornhaut
- Kontaktlinsentragen
- Hormonstörungen (Menopause)
- Klimaanlagen, Wind, Kälte, trockene Hitze, Staub, Rauch, Luftverschmutzung
- Bildschirmarbeiten, lange Autofahrten, Langstreckenflüge
- Schwimmen in chlorhaltigem Wasser

Zusammensetzung

0.15 % Hylan A, Natriumchlorid, Natriumhydrogenphosphat, Natriumdihydrogenphosphat und aqua purificata

Gebrauchsanweisung

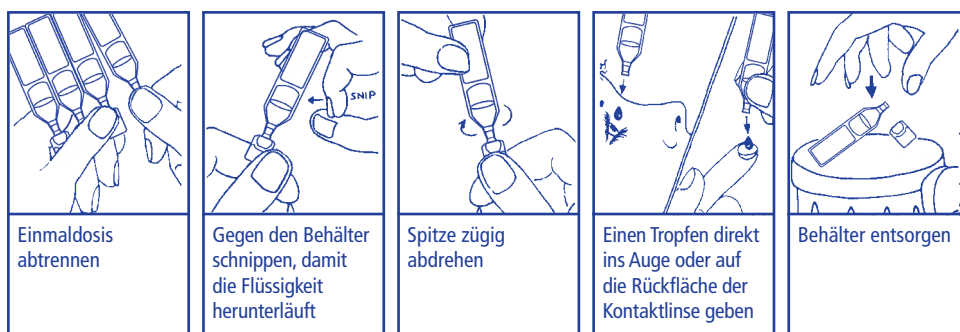

Durch leichte Lidmassage bei geschlossenen Lidern verteilt sich das Produkt nach dem Eintropfen schneller auf der Augenoberfläche.

Lagerung

Bei 2 °C bis 25 °C lagern. Vor Frost schützen.

Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise

- Nicht verwenden bei beschädigtem Einmalbehältnis.
- Das Auge mit dem Einmalbehältnis nicht berühren.
- Wegen des Kontaminationsrisikos Kontakt der Öffnung des Einmalbehältnisses mit anderen Oberflächen oder den Händen vermeiden.
- Nur zur einmaligen Anwendung bestimmt; geöffnete Einmalbehältnisse wegwerfen.
- Nicht zusammen mit Arzneimitteln zur Anwendung am äußeren Auge verwenden.
- Nicht an infizierten Augen anwenden.
- Nach der Anwendung kann vorübergehend die Sehschärfe verringert sein. In diesem Fall kein Fahrzeug lenken, keine Maschinen bedienen. Warten bis die normale Sehschärfe wieder eingetreten ist.

Packungsgröße

15 x 0,3 ml Einmaldosen

Hersteller

i.com medical GmbH
Kafflerstr. 15, 81241 München, Deutschland
www.icom-medical.de

