

Mode d'emploi

Comfort Shield® MDS®

(Hylan A fluide, 0.15 %)



Description

Comfort Shield est une solution stérile, viscoélastique formant un film protecteur transparent pour la cornée. Il est sans conservateur et uniquement composé de substances naturellement présentes dans l'œil. Par conséquent, **Comfort Shield** n'est pas allergisant et peut donc être utilisé par des personnes ayant un terrain allergique. **Comfort Shield** imite les fonctions des larmes naturelles: **Comfort Shield** protège, humecte et lubrifie la surface oculaire.


Comfort Shield soulage ainsi durablement les yeux dans les cas de sécheresse oculaire qui peuvent être causés par :

- Une kératoconjonctivite sèche (Syndrome de Gougerot-Sjögren)
- Des blessures de la cornée, une érosion cornéenne, des procédures chirurgicales affectant la cornée.
- Le port de lentilles de contact
- Des déséquilibres hormonaux (la ménopause)
- L'air conditionné, le vent, le froid, la chaleur sèche, la poussière, la fumée, la pollution de l'air.
- Le travail sur écran, les longs trajets en voiture, les vols long-courriers
- La baignade dans de l'eau chlorée

Composition

0.15% Hylan A, Chlorure de sodium, hydrogénophosphate de sodium, dihydrogénophosphate de sodium, eau purifiée.

Mode d'emploi

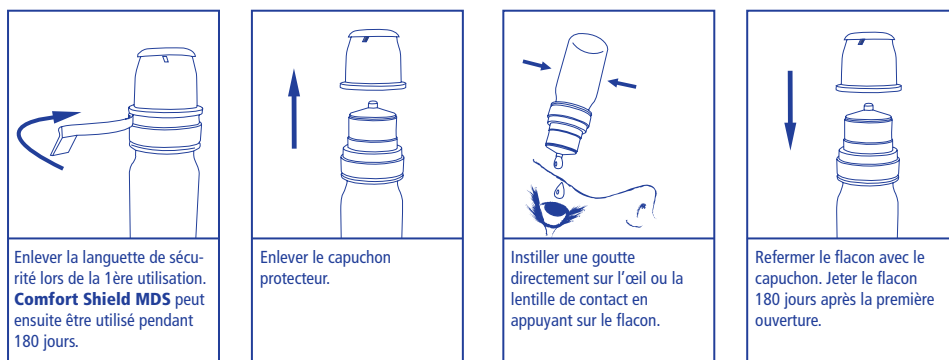

Le produit se répartit plus rapidement sur la surface de l'œil en massant légèrement la paupière et en gardant les yeux fermés.

Stockage

Conserver entre 2 °C et 25 °C, protéger du gel.

Précautions d'emploi et avertissements

- Ne pas utiliser si la languette de sécurité est endommagée.
- Ne pas toucher l'œil avec le flacon.
- Éviter le contact entre l'embout du flacon et vos mains ou d'autres surfaces en raison du risque de contamination.
- Ne pas utiliser avec d'autres collyres ou traitements à appliquer dans l'œil par voie externe.
- Ne pas utiliser sur des yeux infectés.
- Après l'application, l'acuité visuelle peut être temporairement réduite. Dans ce cas, ne conduisez pas de véhicules, ne faites pas fonctionner de machines. Attendez que l'acuité visuelle soit redevenue normale.
- Noter la date d'ouverture sur la bouteille.
- Jeter le flacon avec les ordures ménagères 180 jours après arrachement de la languette de sécurité.

Présentation

Système multi-doses de 10 ml (MDS)

Fabricant

i.com medical GmbH
Kafflerstr. 15, 81241 Munich, Allemagne
www.i.com-medical.de

