

## Mode d'emploi

### Comfort Shield® SD

(Hylan A fluid, 0.15 %)



### Description

**Comfort Shield** est une solution stérile, viscoélastique formant un film protecteur transparent pour la cornée. Il est sans conservateur et uniquement composé de substances naturellement présentes dans l'œil. Par conséquent, **Comfort Shield** n'est pas allergisant et peut donc être utilisé par des personnes ayant un terrain allergique. **Comfort Shield** imite les fonctions des larmes naturelles: **Comfort Shield** protège, humecte et lubrifie la surface oculaire.


**Comfort Shield** soulage ainsi durablement les yeux dans les cas de sécheresse oculaire qui peuvent être causés par :

- Une kératoconjonctivite sèche (Syndrome de Gougerot-Sjögren)
- Des blessures de la cornée, une érosion cornéenne, des procédures chirurgicales affectant la cornée.
- Le port de lentilles de contact
- Des déséquilibres hormonaux (la ménopause)
- L'air conditionné, le vent, le froid, la chaleur sèche, la poussière, la fumée, la pollution de l'air.
- Le travail sur écran, les longs trajets en voiture, les vols long-courriers
- La baignade dans de l'eau chlorée

### Composition

0.15% Hylan A, Chlorure de sodium, hydrogénophosphate de sodium, dihydrogénophosphate de sodium, eau purifiée.

### Mode d'emploi

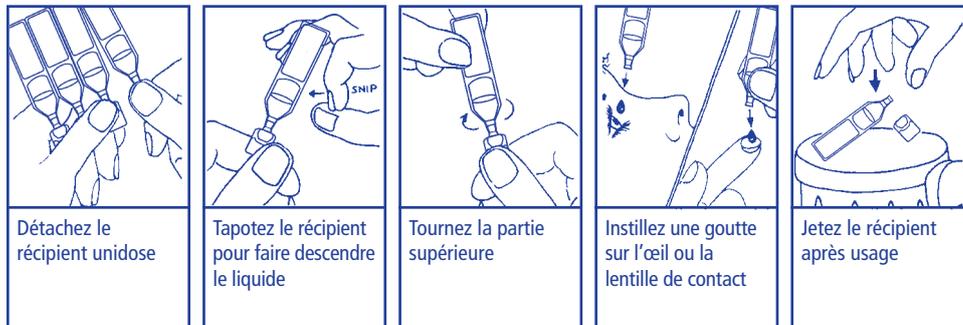

Le produit se répartit plus rapidement sur la surface de l'œil en massant légèrement la paupière et en gardant les yeux fermés.

### Stockage

Conserver entre 2 °C et 25 °C, protéger du gel.

### Précautions d'emploi et avertissements

- Ne pas utiliser si le récipient unidose est endommagé.
- Ne pas toucher l'œil avec le récipient.
- En raison du risque de contamination, éviter le contact de l'ouverture du récipient unidose avec les mains ou autres surfaces.
- Jetez le récipient unidose après usage.
- Ne pas utiliser avec d'autres collyres ou traitements à appliquer dans l'œil par voie externe.
- Ne pas utiliser sur des yeux infectés.
- Après application, l'acuité visuelle peut être temporairement réduite. Dans ce cas, il est conseillé d'éviter de conduire ou de faire fonctionner des machines jusqu'à récupération d'une acuité visuelle normale.

### Présentation

15 x 0.3 ml unidoses

### Fabricant

i.com medical GmbH  
Kafflerstr. 15, 81241 Munich, Allemagne  
www.icom-medical.de

