

Mode d'emploi

Comfort Tears® MDS®

(Hyaluronate de sodium, 0.15 %)



Description


Comfort Tears est une solution stérile, viscoélastique et sans conservateur qui forme un film protecteur transparent pour la cornée. Entièrement constitué de substances biologiques et naturelles, **Comfort Tears** protège et humidifie la surface de l'œil et assure un effet lubrifiant ainsi qu'un soulagement durable dans les cas de:

- sécheresse oculaire
- port de lentilles de contact
- air conditionné, vent, froid, chaleur sèche, poussière, fumée, pollution de l'air
- travail sur écran, longs trajets, vols long-courriers

Composition

0.15 % hyaluronate de sodium, chlorure de sodium, hydrogénophosphate de sodium, dihydrogénophosphate de sodium et aqua purificata

Mode d'emploi

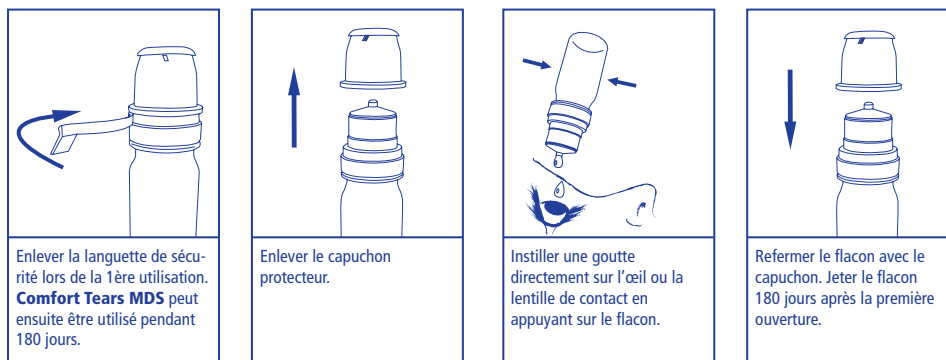

Le produit se répartit plus rapidement sur la surface de l'œil en massant légèrement la paupière et en gardant les yeux fermés.

Stockage

Conserver entre 2 °C et 25 °C, protéger du gel.

Précautions d'emploi et avertissements :

- Ne pas utiliser si la languette de sécurité est endommagée.
- Ne pas toucher l'œil avec le flacon.
- Eviter le contact entre l'embout du flacon et vos mains ou d'autres surfaces en raison du risque de contamination.
- Ne pas utiliser avec d'autres collyres ou traitements à appliquer dans l'œil par voie externe.
- Ne pas utiliser sur des yeux infectés.
- Après l'application, l'acuité visuelle peut être temporairement réduite. Dans ce cas, ne conduisez pas de véhicules, ne faites pas fonctionner de machines. Attendez que l'acuité visuelle soit redevenue normale.
- Noter la date d'ouverture sur la bouteille.
- Jeter le flacon avec les ordures ménagères 180 jours après arrachement de la languette de sécurité.

Présentation

Système multi-doses de 10 ml (MDS)

Fabricant

i.com medical GmbH
Kafelerstr. 15, 81241 Munich, Allemagne
www.i.com-medical.de

